



Tamanho	Referências
S (6-7)	GNN.01P.10
M (7-8)	GNN.02P.10
L (8-9)	GNN.03P.10
XL (9-10)	GNN.04P.10

Características

- Feito de nitrilo azul (Acrilonitrilo-Nitrilo-Butadieno).
- Livre de látex de borracha natural.
- Superfície interior lisa, com tratamento copolímero que facilita o calçado e reduz o risco de dermatites.
- Superfície externa texturizada na palma da mão e dedos para melhorar a aderência.
- Adequado para utilização em contacto com alimentos.
- Punho comprido (> 5 cm), anatomicamente ajustável, com aro anti-gota.
- Material elástico, não prensante, evitando a fadiga do utilizador.
- Protecção contra riscos biológicos e químicos (Tipo B).
- Ambidextro.
- Marca: AachenPremium.
- AQL: 1.0AQL: 1.0

LUVA DE NITRILO NÃO ESTERILIZADA SEM PÓ **AACHENPREMIUM**

Uso e Aplicações



Devido à grande resistência e protecção oferecida pelo material com que este tipo de luvas é fabricado, é recomendado para utilização na Indústria Alimentar, Oficinas Automotoras, Laboratórios, Atestados, Limpeza, etc., e em qualquer campo onde óleos, gorduras, solventes ou produtos químicos são frequentemente manuseados.

No sector da Saúde, a sua utilização destina-se à protecção do paciente e do utilizador contra riscos biológicos e químicos, no exame e exploração de pacientes, extracções de amostras biológicas e analíticas, e na limpeza e manuseamento de instrumentos.

Normativa

Reglamento (UE) 425/2016
Real Decreto 1591/2009
Reglamento UE 745/2017
Real Decreto 866/2008
Reglamento (UE) 10/2011
EN-ISO 374-1:2016/A1:2018
EN 374-2:2016
EN 16523-1:2015
EN 374-4:2013
EN-ISO 374-5:2016
UNE-EN-455/1-2-3-4
EN 420:2003 + A1:2009
ASTM D 6978-05
EN 1186
ISO 13485
ISO 9001
ISO 14001

**LUVA DE NITRILO NÃO ESTERILIZADA
SEM PÓ AACHENPREMIUM**

Medidas

Tamanho	Alongado (mm)	Largura palma da mão (mm)	Peso unidade (g)	Espessura (mm)		
				Punho	Palma	Dedos
S (6-7)	245 ± 5	85 ± 5	4,0 ± 0.3	Mín. 0,05	Mín. 0,08	Mín. 0,09
M (7-8)		95 ± 5	4,5 ± 0.3			
L (8-9)		105 ± 5	5,0 ± 0.3			
XL (9-10)		115 ± 5	5,5 ± 0.3			

Propiedades físicas

Propiedades		/Resultado	Norma de referencia
Dexteridade		5	EN 420
Ausência de buracos		Cumpr	EN 455-1
Dimensões		Cumpr	EN 455-2
Força de rompimento		> 6 N	EN 455-2
Alongamento %	original	500	ASTM D 6319
	envelhecido	400	
Tensão de alongamento		Mín. 14 MPa	
Teste de fugas de ar		Não há fuga	EN 374-2
Teste de fugas de água		Não há fuga	

Propiedades físico-químicas

Resistencia a Productos químicos				Nivel de protección química
Producto		Tiempo de paso (EN 16523-1)	Degradación (EN 374-4)	
K	Hidróxido Sódico 40%	6 / tiempo de paso > 480 min	-26,0 %	Tipo B
P	Peróxido de Hidrógeno 30%	2 / tiempo de paso > 30 min	18,6 %	
T	Formaldehído 37%	5 / tiempo de paso > 240 min	3,1 %	

**LUVA DE NITRILO NÃO ESTERILIZADA
SEM PÓ AACHENPREMIUM**

Resistencia a citostáticos		
Propriedade	Tempo de passagem	Norma
Carmustine (BCNU) 3,3 mg/ml (3.300 ppm)	35,3 min.	ASTM D 6978-05
Cysplatin 1,0 mg/ml (1.000 ppm)	≥ 240 min.	
Cyclophosphamide(Cytoxan), 20 mg/ml (20.000 ppm)	≥ 240 min.	
Doxorubicin Hydrochloride 2,0 mg/ml (2.000 ppm)	≥ 240 min.	
Etoposide (Toposar) 20,0 mg/ml (20.000 ppm)	≥ 240 min.	
Fluorouracil 50,0 mg/ml (50.000 ppm)	≥ 240 min.	
Mechlorethamine HCl 1,0 mg/ml (1.000 ppm)	≥ 240 min.	
Methotrexate, 25 mg/ml (25.000 ppm)	≥ 240 min.	
Mitomycin C, 0,5 mg/ml (500 ppm)	≥ 240 min.	
Paclitaxel (Taxol) 6.0 mg/ml (6.000 ppm)	≥ 240 min.	
Thiotepa 10,0 mg/ml (10.000 ppm)	29.2 min.	
Vincristine Sulfate, 1,0 mg/ml (1.000 ppm)	≥ 240 min.	

LUVA DE NITRILO NÃO ESTERILIZADA SEM PÓ **AACHENPREMIUM**

Apresentação

Embalagem: Caixa de distribuição (caixa) de 100 unidades, com aba removível fácil de abrir na parte superior para facilitar a remoção da luva.

Embalagem: Caixa de 10 caixas (1.000 unidades).

Cada caixa é impressa com as seguintes informações: Nome do produto em várias línguas, referência, código de barras, tamanho, número do lote, unidades contidas, AQL e folheto informativo (ver página seguinte).

Pictogramas:



Data de fabrico.



Uso único.



Protecção
contra riscos biológicos



Data de
expiração.



Qualidade
alimentar.



Protecção química



Temperaturas e
condições de
armazenamento.



Sem látex




Marcado CE.

Medidas logísticas


Caixa dispensadora (aprox.)

23 x 12 x 6,5 cm

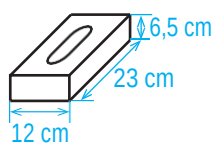

Caixa (aprox.)

33 x 25 x 24 cm

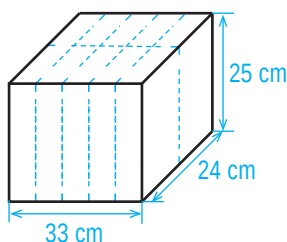

Peso da caixa (aprox.)

Talla	Peso (Kg)
S (6-7)	4,75
M (7-8)	5,30
L (8-9)	5,70
XL (9-10)	6,30

Armazenamento

Armazenar num local seco e ventilado com temperaturas nunca inferiores a -2 °C e nunca superiores a 50 °C. No entanto, recomenda-se manter entre 5 °C e 35 °C. Proteger da luz solar.

